

LENTEX EXCLUSIVE

Komfortable Hygienematratze mit einzigartigem laminiertem Bezug und drei verklebten Schaumstoffen.

Exclusive ist eine stabile Hygienematratze **der LENTEX[®] Reihe, die** für die Behandlung von Druckgeschwüren bis einschließlich Kategorie 2 entwickelt wurde. Die ausgeklügelte Schaumstoffzusammensetzung mit einem festeren Schaumstoffkern und zwei verklebten weicheren Schaumstoffen sorgt für hohen Komfort und gute Druckentlastung.

- **EIN EXTREM FLEXIBLER BEZUG** ermöglicht das Eintauchen und Umschließen. Ein wichtiger Faktor für eine gute Druckentlastung.
- **EIN HALBTRANSPARENTES LAMINAT** erleichtert die Erkennung von kontaminierten Schaumstoffkernen.
- **VÖLLIG FREI VON NÄHTEN UND REISSVERSCHLÜSSEN**, um das Risiko einer Verunreinigung des Matratzenschaumkerns zu verringern
- **WEISSE AUSSENSCHICHT**
Die helle Außenschicht erleichtert es dem Personal, Verunreinigungen auf der Oberfläche der Matratze zu erkennen.
- **EINZIGARTIGE OBERFLÄCHE FÜR EFFEKTIVE REINIGUNG**
Externe Studien haben gezeigt, dass der Bezug dank der einzigartigen Struktur seiner Außenschicht bei der Reinigung 73 % mehr Desinfektionsmittel* zurückhält.

** Studie, Deutschland 1999*



LENTEX EXCLUSIVE

EINE STRAPAZIERFÄHIGE MATRATZE MIT GUTER DRUCKENTLASTUNG.

Zugelassen für die Bett- und Matratzenwäsche

Da Betten und Matratzen immer häufiger maschinell gewaschen werden, ist es wichtig, dass es Produkte gibt, die diese Behandlung vertragen, ohne mit Wasser gefüllt oder aufgeblasen zu werden. Unsere Lentex Matratzen sind für die Verwendung mit Sonosteam/Semi Staal Bett- und Matratzenwaschanlagen getestet und zugelassen.


Entlastung für hervorstehende Körperteile

Der Schaumstoffkern besteht aus drei Schichten sorgfältig ausgewählter Schaumstoffarten. Zusammen mit der einzigartigen Lentex® Außenschicht schafft dies die Voraussetzungen für eine sehr gute Druckentlastung. Die Matratze hat einen dokumentierten niedrigen Druck (51 mm/Hg) für hervorstehende Körperteile, wie Fersen und Schultern, so dass keine separate Fersenzone erforderlich ist.

Langlebigkeit und Sitzfunktion

Die Matratze wurde nach der Norm SS 876 00 11 mit guten Ergebnissen auf Ermüdung getestet. Die Matratze bietet somit eine Sitzfunktion mit erhöhter Rückenposition im Bett.

2 cm superweicher Kaltschaum 23 kg/m³
9 cm druckentlastender Polyether 40 kg/m³
2 cm superweicher Kaltschaum 23 kg/m³

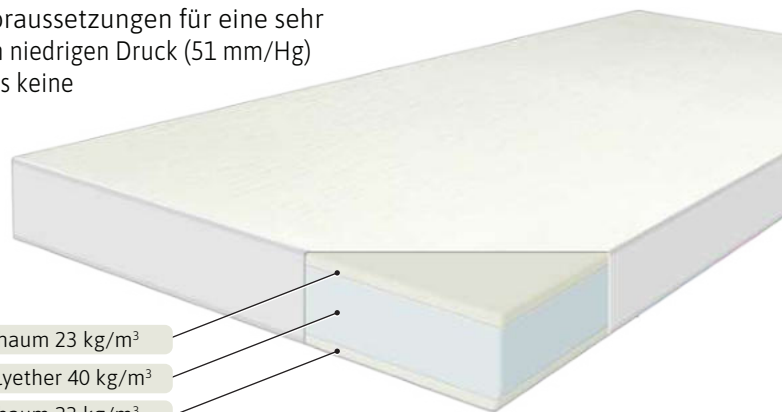

NORM FÜR DIE OBJEKTIVE BEWERTUNG DER DRUCKENTLASTENDEN EIGENSCHAFTEN VON MATRATZEN.

Um eine objektive Bewertung der druckentlastenden Eigenschaften von Matratzen zu erhalten, hat RISE eine Norm entwickelt, bei der der tatsächliche Gegendruck einer Matratze mit Hilfe von Eindrückkörpern gemessen wird. Das Messverfahren ist in der schwedischen Norm SS 876 00 13 beschrieben.

Lentex® Exclusive wurde von RISE nach SS 876 00 13 getestet und ist druckentlastend bis einschließlich Wundkategorie 2.

Die Testergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst.

Belastung	Extra niedrig	Niedrig	Mittel	Hoch
Großer Eindrückkörper 300 N	< 30,0	30,0 – 34,9	35,0 – 39,9	40,0 – 44,9
Großer Eindrückkörper 600 N	< 45,0	45,0 – 52,9	53,0 – 60,9	61,0 – 68,9
Kleiner Eindrückkörper 40 N	< 45,0	45,0 – 52,9	53,0 – 60,9	61,0 – 68,9

Matratze	Großer Eindrückkörper 300 N	Großer Eindrückkörper 600 N	Kleiner Eindrückkörper 40 N
Lentex Exclusive	35	48	51

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



Material 2 cm superweicher Kaltschaum 23 kg/m³,
9 cm druckentlastender Polyether 40 kg/m³,
2 cm superweicher Kaltschaum 23 kg/m³.
Die Lentex® Außenschicht besteht aus Polyurethan.

Größen 200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 13 cm
(Für andere Größen wenden Sie sich bitte an Järven Health Care).

Wundkategorie Bis einschließlich Kategorie 2

Matratzengewicht 6 – 8 kg je nach Länge und Breite

Hygiene SS-EN ISO 811

Matratzenwäsche Zugelassen von Sonosteam/Semi Staal

Max. Benutzergewicht 180 kg

Garantie 3 Jahre auf Ermüdung des B-Wertes des Matratzenkerns nach SS 876 00 11.
5 Jahre mit Altersabschreibung auf das Haftvermögen von Lentex.

Feuer SS 87600 01, normales Risiko (Prüfverfahren EN 597-1 und 2)

Recycling Vollständig recycelbar. Wird als brennbarer Abfall entsorgt. Ein Zerlegen in die Bestandteile ist nicht erforderlich.

Kennzeichnung Herstellungsjahr, -monat, -tag, EAN, Pflegehinweise, Kontaktinformationen, erfüllte Normen und Lage im Bett.



Järven Health Care

Bromsvägen 3 | 891 60 Örnsköldsvik | SCHWEDEN
Tel: +46 (0)660-22 28 50 | Fax: +46 (0) 660 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se