



LENTEX WATERLILY

Durchdachte Hygienematratze mit guten Umwelteigenschaften, die auch für schwerere Patienten geeignet ist

Lentex[®] Waterlily ist eine elastische und flexible Matratze, die sich gut für schwerere Patienten eignet. Der Matratzenkern wurde speziell aufgrund seiner guten Umwelteigenschaften gewählt. Diese werden durch sehr gute Ergebnisse in der umfassenden Lebenszyklusanalyse der Matratze hinsichtlich der Umweltauswirkungen bestätigt.

- **SEHR GUTE DRUCKENTLASTUNG.** Der extrem flexible Bezug trägt zur guten Druckentlastung der Matratze bei, indem er Eintauchen und Umschließen ermöglicht.
- **REDUZIEREN SIE DAS KONTAMINATIONSRISIKO** mit LENTEX, das keine Nähte oder Reißverschlüsse aufweist
- **WENIGER THERAPIEASSOZIIERTE INFEKTIONEN.** Der halbtransparente Bezug erleichtert die Erkennung von kontaminierten Schaumstoffkernen.
- **BEUGEN SIE THERAPIEASSOZIIERTEN INFEKTIONEN VOR** Die helle Außenschicht erleichtert es dem Personal, eine Verunreinigung der Matratzenoberfläche zu erkennen.
- **EINZIGARTIGE OBERFLÄCHE** für eine effektive Reinigung. Externe Studien haben gezeigt, dass der Bezug dank der einzigartigen Struktur seiner Außenschicht bei der Reinigung 73 % mehr Desinfektionsmittel* zurückhält.
- **GUTE GESAMTWIRTSCHAFTLICHKEIT** dank der hohen Qualität des Schaumstoffs ist die Matratze äußerst langlebig.

** Studie, Deutschland 1999*



LENTEX WATERLILY

ENTWICKELT FÜR HOHEN KOMFORT UND SEHR GUTE DRUCKENTLASTUNG.

Zugelassen für die Bett- und Matratzenwäsche

Da Betten und Matratzen immer häufiger maschinell gewaschen werden, ist es wichtig, dass es Produkte gibt, die diese Behandlung vertragen, ohne mit Wasser gefüllt oder aufgeblasen zu werden. Unsere Lentex Matratzen sind für die Verwendung mit Sonosteam/Semi Staal Bett- und Matratzenwaschanlagen getestet und zugelassen.

Entlastung für hervorstehende Körperteile

Der homogene Schaumstoffkern besteht aus einem ausgewählten umweltfreundlichen Schaumstoff. Zusammen mit der einzigartigen Lentex® Außenschicht schafft dies die Voraussetzungen für eine sehr gute Druckentlastung. Die Matratze weist einen dokumentierten niedrigen Druck (50 mm/Hg) für hervorstehende Körperteile wie Fersen und Schultern auf, so dass keine separate Fersenzone erforderlich ist.

Langlebigkeit und Sitzfunktion

Die Matratze wurde nach der Norm SS 876 00 13 mit gutem Ergebnis druckgeprüft. Die Matratze bietet somit eine Sitzfunktion mit erhöhter Rückenposition im Bett.



12 cm Waterlily-Schaum 53 kg/m³

NORM FÜR DIE OBJEKTIVE BEWERTUNG DER DRUCKENTLASTENDEN EIGENSCHAFTEN VON MATRATZEN

Um eine objektive Bewertung der druckentlastenden Eigenschaften von Matratzen zu erhalten, hat RISE eine Norm entwickelt, bei der der tatsächliche Gegendruck einer Matratze mit Hilfe von Eindrückkörpern gemessen wird. Das Messverfahren ist in der schwedischen Norm SS 876 00 13 beschrieben.

Lentex® Waterlily wurde von RISE nach SS 876 00 13 getestet und ist druckentlastend bis einschließlich Wundkategorie 2.

Die Testergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst.

Belastung	Extra niedrig	Niedrig	Mittel	Hoch
Großer Eindrückkörper 300 N	< 30,0	30,0 – 34,9	35,0 – 39,9	40,0 – 44,9
Großer Eindrückkörper 600 N	< 45,0	45,0 – 52,9	53,0 – 60,9	61,0 – 68,9
Kleiner Eindrückkörper 40 N	< 45,0	45,0 – 52,9	53,0 – 60,9	61,0 – 68,9

Matratze	Großer Eindrückkörper 300 N	Großer Eindrückkörper 600 N	Kleiner Eindrückkörper 40 N
Waterlily	32	48	50

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



Material	12 cm homogener MDI-Schaum 53 kg/m³, Lentex® Außenschicht aus Polyurethan	Garantie	4 Jahre auf Ermüdung des B-Wertes des Matratzenkerns nach SS 876 00 11. 5 Jahre mit Altersabschreibung auf das Haftvermögen von Lentex.
Größen	200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 12 cm (Für andere Größen wenden Sie sich bitte an Järven Health Care).	Feuer	SS 87600 01, normales Risiko (Prüfverfahren EN 597-1 und 2)
Wundkategorie	Bis einschließlich Kategorie 2	Recycling	Vollständig recycelbar. Wird als brennbarer Abfall entsorgt. Ein Zerlegen in die Bestandteile ist nicht erforderlich.
Matratzengewicht	10 – 16 kg je nach Länge und Breite	Kennzeichnung	Herstellungsjahr, -monat, -tag, EAN, Pflegehinweise, Kontaktinformationen, erfüllte Normen und Lage im Bett
Hygiene	SS-EN 811:2018		
Matratzenwäsche	Zugelassen von Sonosteam/Semi Staal		
Max. Benutzergewicht	180 kg		



Järven Health Care

Bromsvägen 3 | 891 60 Örnsköldsvik | SCHWEDEN
Telefon: +46(0)660-22 28 50 | Telefax: +46(0)660-824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se